



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MAN-FB-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Realización: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **Nº-241013** Fecha Inicio: **04/04/22** 8:07 Fecha Fin: **08/04/22** 10:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FAULT	PARTE	CLASE	CANT.	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE
		Switch encendido	L	OX	No			
				SI	No			
				SI	No			
				SI	No			
				SI	No			
				SI	No			

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	SANG.	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (L-ES)	Pila (L-ES)	"Fijo a 0" (L-ES)				01-01	01-02	01-03			01-04	01-05
930	6.062.7	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. Concentros						
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 4 min		Control Alarma: No		Cual? SI											
2. RUIDO EXTRAÑO		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> MALO <input type="checkbox"/>							
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Subcriteriamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hermética del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX parte
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Platillos de filtro	2			
	Bases de filtro interno	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Carga Regulada)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	Lo
2	Fijo Máximo	Se verifica activación de alarma vital y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-L0-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	SANG.	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-ES)	Pila (L-ES)	"Fijo a 0" (L-ES)				01-01	01-02	01-03		
930	6.145.9	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Fuerza Concentramente			Firma Mantenimiento: <i>Valentin C.</i>	